

EVOLVEO

FitBand B3

Vážený zákazník, ďakujeme, že ste sa rozhodli pre zariadenie EVOLVEO FitBand B3.

Začíname

Vitajte vo svete B3, vo svete náramku s farebným displejom, ktorý vás motivuje pri dosiahnutí vašich cieľov vo veľkom štýle.

Balenie B3 obsahuje:

Jednotku B3 a 2 náramky

Zariadenie B3 sa skladá z dvoch častí: z jednotky B3 a náramku. Náramky v ďalších farbách sa predávajú samostatne.

Nastavenie náramku B3

Začneme vytvorením vášho účtu EVOLVEO Fit a zabezpečením, že jednotka B3 dokáže preniesť zhromaždené údaje do dashboardu aplikácie. Dashboard je miesto, v ktorom si nastavíte vaše ciele a analyzujete údaje z minulosti. Identifikujte trendy, držte krok s priateľmi a oveľa viac. Hneď ako dokončíte nastavenie náramku, ste pripravení začať sa hýbať.

Váš účet jednotky B3 požaduje informácie ako výška, hmotnosť a pohlavie, aby mohol urobiť rôzne výpočty. Vaše meno a priemerný počet krokov za deň sú v rámci základného nastavenia viditeľné pre všetkých priateľov B3.

Nastavenie jednotky B3 na vašom mobilnom zariadení

Voľne dostupná aplikácia EVOLVEO Fit je kompatibilná s iOS 8.0 a vyššou verziou, a s Androidom 4.4 a vyššou verziou, s viac než 150 operačnými systémami pre mobilné zariadenie.

APLIKÁCIA NA STIAHNUTIE



EVOLVEO Fit



EVOLVEO Fit


1. V závislosti od vášho zariadenia nájdete na jednom z týchto miest aplikáciu EVOLVEO Fit.
 - v Apple APP STORE pre zariadenie s iOS (iPhone)
 - v Google PLAY STORE pre zariadenie s Androidom

Podpora:

BT4.0 kompatibilné s iOS 8.0 a vyššou, a Androidom 4.4 a vyššou

2. Nainštalujte aplikáciu, otvorte ju, zaregistrujte sa a prihláste sa do účtu a aplikácia vás povedie inštrukciami.
3. Pokračujte podľa uvedených inštrukcií a pripojte alebo spárujte jednotku B3 s vašim mobilným zariadením. Párovaním sa ubezpečíte, že jednotka B3 spolu s mobilným zariadením môžu navzájom komunikovať (synchronizácia údajov tam a späť).

Kliknite na aplikáciu -> Zariadenie -> zvolte EVOLVEO FitBand B3

4. Len čo sa na náramku objaví , dlho stlačte dotykovú oblasť a potvrdte, v aplikácii stlačte voľbu Párovať.
(Poznámka: ak sa užívateľovi iOS nepodarí náramok FitBand B3 spárovať, skontrolujte nastavenie telefónu -- Bluetooth -> FitBand B3 -> Zabudnúť toto zariadenie.)

Použitie dotykového displeja




Výmena náramku

Náramok obsahuje dve samostatné časti (jednotku B3 a pásik), pričom pásik sa predáva samostatne a možno ho ľubovoľne meniť.

Vybratie náramku

Vybratie náramku:

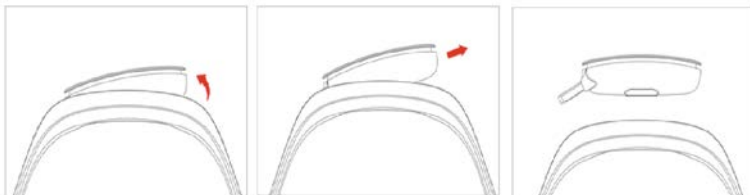

Pokyny pre nabíjanie



Je podporovaná iba 5V USB nabíjačka!
Nepoužívajte USB nabíjačku s iným napätím.

Ak je batéria takmer vybitá, po niekoľkých sekundách od prebudenia jednotky B3 sa zobrazí ikona vybitej batérie.

Poznámka: Prv než začnete jednotku B3 nabíjať, zabezpečte sa, že telo jednotky je suché a nie je v blízkosti kvapalín, ako sú nápoje, voda a pod. V opačnom prípade môže ľahko nastať skrat.

Úroveň batérie môžete sledovať kedykoľvek priamo na vašej jednotke B3 alebo prostredníctvom aplikácie EVOLVEO Fit.



Nabíjanie jednotky:

Do USB portu na počítači alebo CE/UL zasuňte autorizovanú USB nabíjačku.

Na displeji jednotky B3 uvidíte ikonu batérie. Ikona batérie po 3 sekundách zmizne



Plné nabitie trvá asi 1 - 2 hodiny. Kým sa jednotka nabíja, môžete poklepaním skontrolovať úroveň nabitia batérie. Plne nabitá jednotka zobrazuje ikonu nabitej batérie.

*Poznámka: Pri nabíjaní prostredníctvom počítača sa ubezpečte, že displej jednotky smeruje dolu.

Automatické sledovanie s B3

Jednotka B3 nepretržite sleduje rôzne stavy, kedykoľvek máte náramok na sebe. Informácia sa prenáša do dashboardu aplikácie vždy, keď obe zariadenia synchronizujete.

Zobrazenie celodenného stavu

Poklepte na jednotku a zobrazte nasledujúce celodenné stavy:

- Kroky
- Pulz
- Krvný tlak
- Prejdená vzdialenosť
- Spálené kalórie

V aplikácii EVOLVEO Fit nájdete ďalšie informácie zaznamenané vašou jednotkou B3, ako je:

- počasie
- história spánku, vrátane počtu hodín a kvality spánku,
- pulzu (BPM), priemerného pokojového pulzu a dynamického pulzu za 15/30/60/120 minút v závislosti od vášho nastavenia
- história cvičení
- diaľkové ovládanie spúšte fotoaparátu
- alarm
- výzva na aktivitu
- antilost alarm

Poznámka: o polnoci sa B3 jednotka resetuje a začne nový deň.



Zoznámenie s ovládaním obrazovky

Prejdite prstom hore/dolu

Zmena režimu / prebudenie obrazovky



Stlačte a podržte na 3 sekundy

Vstup na testovaciu stránku



Stlačte a podržte na 3 sekundy

Návrat do hlavného rozhrania



Dotknite sa obrazovky
Kliknite na obrazovku a skontrolujte stav

Meranie krvného tlaku

Príprava pred meraním

Aby ste zaistili presné meranie prostredníctvom systému merania tlaku FitBand B3, dodržujte nasledujúce pokyny:

1. 30 minút pred meraním sa nekúpte, nefajčite, necvičte, nepite alkohol, kofeínové nápoje ani nejedzte.
2. Stres môže spôsobiť zvýšenie krvného tlaku, preto sa vyvarujte merania počas stresových situácií.
3. Meranie by sa malo robiť na pokojnom mieste. Posadte sa na stoličku s chodidlami položenými na podlahu. Posadte sa rovno a chrbát a ruku si oprite o opierku. Zostaňte v pokoji a počas merania nehovorte.

Začatie merania krvného tlaku

1. Vstúpte do rozhrania Krvného tlaku.



Dlho stlačte tlačidlo a jednotka B3 potom začne merať. Na testovaný prst príliš netlačte ani sa ním nedotýkajte obrazovky príliš jemne.

2. Po niekoľkosekundovom meraní sa na displeji jednotky B3 nasledujúcim spôsobom zobrazí výsledok.



3. Ak sú výsledky príliš odlišné (>10 mmgh), meranie zopakujte.

*Jednotka B3 nemá funkciu lekárskeho/diagnostického zariadenia. Slúži iba na monitorovanie vývoja krvného tlaku pre osobnú potrebu užívateľa.

Ak nie je k dispozícii žiadny výsledok merania krvného tlaku, najpravdepodobnejšími príčinami sú:

1. Nedošlo k správne mu kontaktu optického senzora s pokožkou testovaného prsta.
2. Testovaná ruka/prst sú príliš studené následkom nedostatočnej cirkulácie.

Na základe vyššie uvedených dôvodov navrhujeme nasledujúce riešenie:

- (1) Metóda 1: Palcom jednej ruky zatlačte silnejšie na obrazovku jednotky B3, aby sa zlepšil kontakt optického senzora s pokožkou testovaného prsta.
- (2) Metóda 2: Zlepšite periférnu cirkuláciu krvi v testovanej ruke/prste. Ak máte často studené ruky/prsty alebo zlú cirkuláciu, skúste niekoľko minút ruku precvičovať, aby sa pred meraním zvýšil krvný obeh.

Postup precvičenia ruky:

Krok 1: Držte ruky pred sebou a zatraste nimi, aby sa zvýšil prietok krvi.

Krok 2: Zovrite ruky do päste a 10 sekúnd ich nechajte zovreté, potom uvoľnite.

Krok 3: Toto cvičenie niekoľkokrát zopakujte.

Počas cvičenia odporúčame použiť poddajný predmet, ako je gumená loptička alebo posilňovacie kliešte.

Aktualizácia jednotky B3

Zlepšenie funkcií a vylepšenie produktov sú voľne prístupné prostredníctvom aktualizácií firmware. Odporúčame jednotku B3 aktualizovať včas.

Len čo je k dispozícii aktualizácia firmware, v aplikácii **EVOLVEO Fit --- Zariadenie---**

Aktualizácia firmware sa zobrazí červená bodka, ktorá vyzve k aktualizácii. Len čo sa aktualizácia spustí, v aplikácii EVOLVEO Fit aj na jednotke B3 sa zobrazí ukazovateľ priebehu, dokým sa aktualizácia nedokončí.

Počas aktualizácie udržiavajte náramok a mobilné zariadenie vo vzájomnej blízkosti.

Poznámka: aktualizácia jednotky B3 trvá niekoľko minút a môže zaťažovať batériu. Preto odporúčame aktualizáciu robiť, keď je jednotka B3 plne nabitá.

Vypnutie a továrenské nastavenie

Ak chcete zariadenie vypnúť, postupujte nasledovne. Nastavte obrazovku na základné zobrazenie, t. j. zobrazenie dátumu a času. Stlačte a podržte displej asi na 2 sekundy, dokým sa neobjaví mala číslica „1“. Opäť stlačte a podržte displej asi na 2 sekundy, dokým sa neobjaví mala číslica „2“. Ďalším stlačením na 2 sekundy sa objaví symbol číslice „3“. Zopakujte postup štvrtýkrát a na displeji sa zobrazí symbol „off“ (vypnuté). Nakoniec stlačte a podržte displej na 2 sekundy ešte raz a jednotka sa vypne.

Ak chcete jednotku prepnúť na továrenské nastavenie, postup opakujte, ale v poslednom kroku displej stlačte len krátko a objaví sa továrenské nastavenie. Potom opäť stlačte a podržte displej na 2 sekundy a jednotka sa prepne na továrenské nastavenie. Všetky namerané údaje budú vymazané a náramok začne merať od nuly. Treťou funkciou nasledujúcou po továrenskom nastavení je kontrola vibrácií. Možno ju opakovane aktivovať podržaním displeja na 2 sekundy.

Špecifikácia

Hmotnosť	21 g
Batéria	Poly-Li
Bluetooth	BT 4.0
Displej	0,96“ IPS obrazovka
Ovládanie	Dotyková plocha
Bluetooth signál	8-10 m
Vodotesnosť	3 ATM

Riešenie problémov s jednotkou B3

Chýba signál pulzu

Jednotka B3 nepretržite sleduje váš pulz počas cvičenia a po celý deň. Občas môže mať jednotka problém pri hľadaní dobrého signálu. Ak sa tak stane, na mieste, kde sa obvykle zobrazuje pulz, sa objaví prerušovaná čiara.

- Ak náramok nespína pulz, najprv skontrolujte, či je náramok správne nasadený. Posuňte ho na zápästí nahor alebo nadol, alebo utiahnite alebo povoľte pásik.
- Potom na chvíľu držte ruku pokojne a rovno a pulz by sa mal opäť objaviť.
- Ak snímanie pulzu stále nefunguje, skontrolujte nastavenie pulzu vo vašej aplikácii a ubezpečte sa, že funkcia je nastavená v režime On (Zapnuté) alebo Auto.

Neočakávané správanie

Ak sa stane, že mobilné zariadenie nemožno s náramkom spárovať, prejdite do **nastavenia Bluetooth**. Ak na telefóne vidíte signál jednotky B3, znamená to, že signál Bluetooth funguje správne. Skontrolujte, či je zariadenie spárované s iným mobilom. Ak áno, spárovanie prostredníctvom aplikácie zrušte. Pri iOS by ste mali podniknúť ešte jeden krok. Prejdite do **Nastavenia telefónu --- Bluetooth --- Zabudnúť zariadenie** a potom opäť spárujte.

Ustanovenie o výnimke

1. Údaje namerané jednotkou B3 o pulze a krvnom tlaku nie sú určené na lekársku diagnózu.
2. Samodiagnostika a samoliečba sú nebezpečné, iba kvalifikovaný lekár môže určiť diagnózu a liečiť vysoký krvný tlak a iné ochorenia srdca. Pre podrobnejšiu diagnózu kontaktujte vášho lekára.
3. Údaje o pulze a krvnom tlaku namerané prostredníctvom jednotky B3 nemusia byť úplne presné a vplyvom rôznych faktorov môžu prekročiť toleranciu, ako je uvedené v špecifikácii vyššie. Dôvodom môže byť interferencia so signálom z vonkajších zdrojov, nosenie náramku v nesprávnej polohe, zmena počasia alebo zmena kondície užívateľa.
4. Neupravujte medikáciu ani postup liečby na základe merania jednotky B3. Pred začiatkom každej liečby a užívania liekov sa riadte pokynmi lekára.

ZRIEKAME SA KAŽDEJ ZODPOVEDNOSTI VYPLÝVAJÚCEJ Z TAKÉHO TO NESPRÁVNEHO KONANIA A NENESIEME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA DÔSLEDKY POUŽITIA TAKÝCHTO ÚDAJOV A INFORMÁCIÍ.

Záručné podmienky

Záručná lehota jednotky B3 sú 2 roky od dátumu zakúpenia. Ak za normálneho používania výrobok vykazuje poruchu alebo je poškodený, čo môže byť potvrdené technickým pracovníkom autorizovaným našou spoločnosťou, spoločnosť poskytne bezplatnú opravu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Najprv si prečítajte „FAQ - často kladené otázky“ na adrese:

www.evolveo.com/sk/fitband-b3 alebo kontaktujte technickú podporu spoločnosti EVOLVEO.

EVOLVEO - TECHNICKÁ PODPORA

www.evolveo.com/sk/podpora

Záruka NEPLATÍ pri:

- mechanickom poškodení spôsobenom nesprávnym použitím
- škodách spôsobených opravami vykonanými nekvalifikovanou osobou
- poklese kapacity batérie po 6 mesiacoch používania (6 mesiacov záruka na výdrž batérie)
- náhodné alebo umelé poškodenie
- šmuhy na výrobku spôsobené umelým poškodením.
- poškodenie spôsobené pripojením k neoprávnenému zariadeniu nepodporujúcemu výrobok
- bežné starnutie výrobku počas jeho životnosti
- škody spôsobené iným zásahom.



— Likvidácia

Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, v priloženej dokumentácii alebo na obale znamená, že v štátoch Európskej únie sa všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory po skončení životnosti musia likvidovať oddelene v rámci triedeného odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

① CE VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. vyhlasuje, že výrobok EVOLVEO FitBand B3 spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sú relevantné pre daný typ zariadenia.

Plné znenie Vyhlásenia o zhode je na <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoEU

Všetky práva vyhradené.

Konštrukcia a technická špecifikácia výrobku sa môžu zmeniť bez predošlého upozornenia.